


COME ADATTARE IL PARADENTI ALLA DENTATURA

- 1 Non è necessario riscaldare il paradenti Lithos Pro per adattarlo alla dentatura. Inserire il paradenti nella bocca e farlo aderire con cura all'apparecchio fisso; assicurarsi che l'apparecchio si allinei al canale interno. Se posizionato correttamente, il paradenti risulterà comodo e si adatterà perfettamente all'impianto.

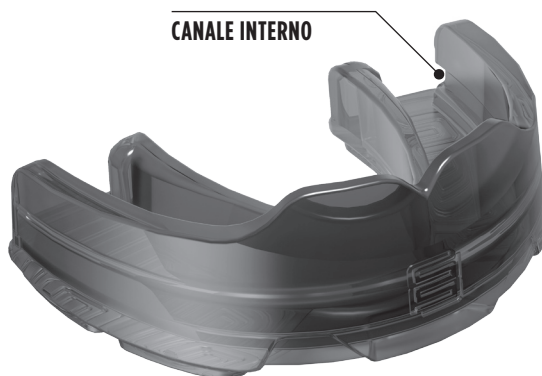

- 2 Rimuovere il paradenti con cura per non danneggiare l'apparecchio.
- 3 Il modello Lithos Pro non richiede "ritocchi finali": non è consentito tagliare il paradenti per adattarlo alla dentatura o renderlo più comodo.

Non gettare questo volantino: contiene informazioni importanti per il consumatore.

ATTENZIONE!

Assicurarsi di aver letto e capito tutte le misure di sicurezza e le istruzioni qui di seguito prima di usare il paradenti.

Questo paradenti è adatto all'uso con l'apparecchio; consultare il dentista o l'ortodontista che ha applicato l'apparecchio o un altro tipo impianto riguardo alla compatibilità di questo paradenti. Quest'ultimo non deve essere usato senza l'assenso di chi ha applicato l'apparecchio.

NON masticare il paradenti.

Se il paradenti viene masticato e/o non è usato nel modo qui indicato, la sua qualità in termini di adattabilità, protezione e durata verrà drasticamente ridotta. Per adattare il paradenti alla dentatura, seguire scrupolosamente le istruzioni sul retro. La persona che utilizza il paradenti Lithos Pro deve scrivere il proprio nome sull'etichetta all'interno della custodia e sullo spazio apposito qui in basso nella guida utente.

Questo paradenti non può essere usato da nessun'altra persona ed è di esclusivo uso della persona indicata sulla guida utente e sulla custodia.

Per atleti la cui mandibola è ancora in fase di crescita, o in caso sia ancora in corso la sostituzione della dentatura decidua o l'eruzione della dentatura permanente, un tutore responsabile deve verificare periodicamente il paradenti per assicurarsi che si adatti ancora alla dentatura. Se il paradenti dovesse risultare allentato o troppo aderente ai denti o alle gengive, deve essere sostituito.

GUIDA UTENTE DEL PARADENTI

- **Questo paradenti è adatto all'uso con l'apparecchio; consultare il dentista o l'ortodontista che ha applicato l'apparecchio o un altro tipo impianto riguardo alla compatibilità di questo paradenti. Quest'ultimo non deve essere usato senza l'assenso di chi ha applicato l'apparecchio.**
- Questa confezione contiene informazioni importanti e deve essere conservata per future consultazioni.
- Il modello Lithos Pro (paradenti pronto all'uso) ha passato i test d'impatto DD 253: 2001 e ha raggiunto il livello di prestazione 2 per persone che praticano sport e attività da contatto moderato, come baseball, pallacanestro, cricket, calcio, hockey, lacrosse, arti marziali, rugby e altri sport da contatto.
- Ci sono due livelli di prestazione associati ai paradenti che passano i test d'impatto DD 253: 2001, ovvero livello 1 e livello 2. Il primo offre un grado inferiore di protezione, mentre il secondo offre un grado superiore di protezione.
- Al momento della scelta di un paradenti, consultare le informazioni fornite dal fabbricante e scegliere un modello di dimensioni e tipo appropriati all'età dell'utente. Assicurarsi che il paradenti sia del tipo e del livello di prestazione adatti allo sport o all'attività per la quale il paradenti verrà usato. L'utente potrà consultare una lista di tutte le attività sportive per le quali questo paradenti è indicato.
- Per adattare il paradenti alla dentatura, leggere le istruzioni sul retro.
- Per atleti la cui mandibola è ancora in fase di crescita, è necessario verificare periodicamente il paradenti per assicurarsi che si adatti ancora alla dentatura. Se risultasse allentato o troppo stretto, dovrà essere sostituito.
- Se si desiderasse usare questo paradenti come bite, consultare il proprio ortodontista o dentista prima dell'utilizzo.
- Questo paradenti è fabbricato in gomma di silicone per uso medico.
- La custodia fornita deve essere usata per conservare il paradenti in un luogo sicuro e igienico. Conservare il paradenti nella custodia quando non è in uso. Dopo ogni uso, lavare il paradenti e la custodia con acqua fresca (non oltre i 35 °C). Asciugare completamente il paradenti prima di riporlo.
- Questo paradenti Lithos Pro è di uso esclusivo di _____ a partire dalla seguente data: / /
- A seconda della frequenza e dell'intensità d'uso, Makura Sport consiglia di sostituire il paradenti ogni 2 anni; è importante tuttavia ispezionare il paradenti osservandolo dopo ogni uso. Se la superficie del morso risultasse consumata, crepata o rotta, il paradenti deve essere sostituito immediatamente.
- Se il paradenti dovesse causare sensibilizzazione o una reazione allergica, o se l'utente dovesse sentire fastidio dopo l'uso, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Questo paradenti pronto all'uso è stato testato e certificato da SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way Industrial Estate, Kettering, Northamptonshire NN 16 8SD, Regno Unito (Numero Organismo Notificato 0321).

Questo paradenti non contiene lattice. Al momento della redazione del presente documento non si è a conoscenza di alcune reazioni allergiche o sensibilizzazioni causate dai materiali usati.